

Проверка и очистка DAC UNIVERSAL


Следует проводить один раз в неделю

1 Очистка сливного фильтра - ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте при этой процедуре перчатки!



ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к очистке фильтра, следует выключить DAC UNIVERSAL и дождаться, пока устройство остынет.

1. Отверните крышку корпуса прилагаемым ключом.
2. Отверните фильтр прилагаемым ключом от корпуса фильтра.
3. Тщательно очистите фильтр под проточной водопроводной водой.
4. Фильтр можно завернуть в бумажную салфетку и продуть его сжатым воздухом в показанном направлении:

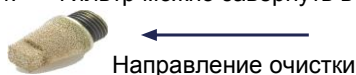

5. Осторожно вверните фильтр прилагаемым ключом в корпус.
6. Приверните крышку корпуса фильтра прилагаемым ключом.

УКАЗАНИЕ: Каждые четыре недели фильтр следует менять на новый (при примерно 10 циклах очистки в день).

2 Контроль подачи масла и воды в камеру



1. Нажмите кнопку "Lubricate" (смазать) и удерживайте ее нажатой.
2. Через несколько секунд вы услышите, как масло начнет перекачиваться, а через короткое время масло начнет поступать в камеру через нижний переходник. Как только масло попадет в камеру, остановите процесс, нажав кнопку "Lubricate" (смазать).
3. Дисплей DAC Universal показывает число подач из масленки. Если это число равно или больше 60, а также если масло не поступает в камеру, свяжитесь с поставщиком. Через некоторое время индикатор масла автоматически деактивируется.
4. Нажмите кнопку "Flush/Rinse" (промывка), удерживая нажатой до тех пор, пока вода не начнет автоматически поступать в камеру по шлангам.
5. Загляните в камеру и проверьте, течет ли вода в камеру через донный переходник.

Проверка и очистка DAC UNIVERSAL


Следует проводить один раз в неделю

3 Контроль переходников и уплотнительных колец переходник



1. Проверьте крепление переходников на крышке, слегка потянув за каждый переходник.
- 2+3. Если какой-либо переходник закреплен не туго, подтяните винты прилагаемым ключом с внутренним шестигранником, вдавив переходник вниз.
4. **УКАЗАНИЕ:** Если какие-либо уплотнительные кольца на переходниках повреждены или отсутствуют, сразу следуйте указаниям в главе 6, пункт 13 в инструкции по эксплуатации "Замена уплотнительных колец переходников".

4 Очистка камеры

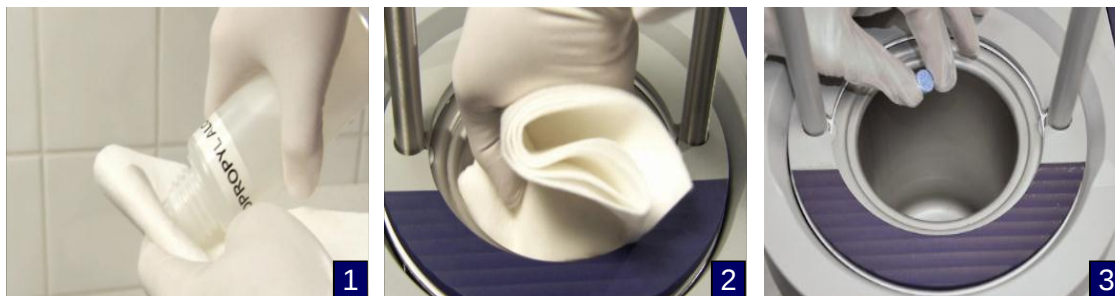

- 1.+ 2. Очистите камеру изопропиловым спиртом или мягким чистящим средством.

УКАЗАНИЕ: Использование хлорсодержащих средств для очистки камеры запрещено.

3. Поместите таблетку Nitra Clean в пустую камеру перед началом цикла. Выполните стандартный цикл обработки, не размещая инструменты в крышке.

УКАЗАНИЕ: дальнейшие указания по проверке и очистке вы найдете в учебном видеокурсе "Check & Clean – DAC UNIVERSAL".

Видео находится на сайте www.youtube.com/user/sironatube – Sirona Hygiene Systems – Tutorial: Weekly maintenance of your DAC UNIVERSAL

Сервис и запасные части

Номер для заказа	Описание	Кол-во
6078583	Аблауффильтер для корпус фильтра	6 штук
6079672	Уплотнительное кольцо для адаптера ISO/INTRAmatic	10 штук
6079698	Уплотнительное кольцо для турбины KaVo (малое)	10 штук
6079748	Уплотнительное кольцо для турбины KaVo и переходника Osada OFJ (большое)	10 штук
6079763	Уплотнительное кольцо для турбины W&H (малое)	10 штук
6079789	Уплотнительное кольцо для турбины W&H (большое) (для адаптера-версии 1)	10 штук
6347319	Уплотнительное кольцо для турбины W&H (среды)	10 штук
6347293	Уплотнительное кольцо для турбины W&H ((большое)	10 штук
6079797	Уплотнительное кольцо для турбины Sirona & Yoshida	10 штук
6079938	Уплотнительное кольцо для турбины Sirona CLASSIC/TE & NSK (большое)	10 штук
6259118	NITRAM OIL#2 (Концентрированное средство для ухода за DAC Universal упаковано с SN № >104000)	6 флаконов
6053842	Чистящая таблетка NitraClean	100 штук
6051788	Кронштейн индикатора	1 штука
5892059	Индикаторная, 3М (класс 5)	100 штука