

HELVO®

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Способна преодолеть бактериальные инфекции

«Эффективность научно доказана вот уже более 15 лет»

Руководство по применению HELVO® «ХЕЛЬБО»



Пародонтит/периимплантит (закрытая операция)

Пародонтит/периимплантит (хирургическая операция)

Эндодонтическое лечение (ортоградное)

Эндодонтическое лечение (ретроградное)

Дезинфекция зубной альвеолы

Остеонекроз

Заболевания кожи/слизистой оболочки (напр., высыпания на слизистой оболочке, герпес, кандидоз, расхождение швов)

Кариес


Фотобиологический эффект лазера:

способствует заживлению ран, уменьшает боль, оказывает противовоспалительное действие

40 YEARS DENTAL INNOVATIONS
1 9 7 4
2 0 1 4

breident group

Пародонтит/ периимплантит (закрытая операция)

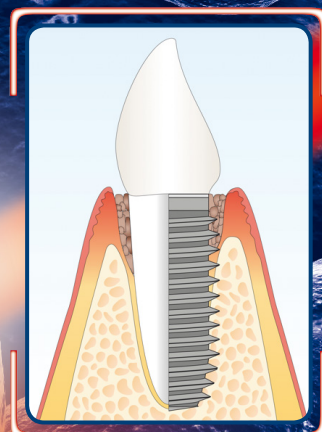

Лечебные материалы

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛБО Блю»,
0,5 мл



или

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛБО
Блю», 0,1мл




Зонд HELBO® 3D Pocket Probe «ХЕЛБО 3-ДЭ Покет Проуб»



Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛБО ТераЛайт»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛБО ТЭ-Контроллер»

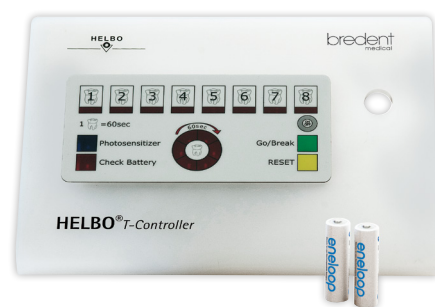

Шаг 1.

Провести профессиональную очистку зуба/имплантата.


Важно: чем меньше конкрементов останется на поверхности зуба/корня, тем свободнее доступ к биопленке! Антимикробная фотодинамическая терапия проводится незамедлительно или не позднее чем через 1–2 дня после очистки.

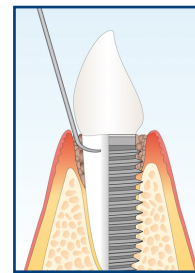

Шаг 2.

Фотосенсибилизатор HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю» наносится от дна кармана к краю.


Важно: в глубине кармана может образоваться воздушный мешочек, который препятствует попаданию фотосенсибилизатора HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю» на все бактерии!

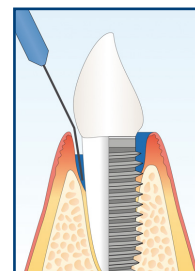

Шаг 3.

Дать фотосенсибилизатору HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю» воздействовать в течение не менее 1 минуты – в случае наличия карманов > 6 мм или стойких инфекций, которые трудно поддаются лечению, а также в случае наличия имплантатов длительность воздействия составляет 3 минуты.


Важно: уничтожаются только бактерии, подкрашенные синим!

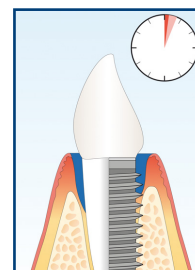

Шаг 4.

Тщательно промыть карманы при помощи H₂O – удалить излишки красителя, в т. ч. в глубине кармана (использовать предназначенные для этого промывочные канюли).

Важно: фотосенсибилизатор HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю» необходимо нанести очень тонким слоем, чтобы луч лазера мог полностью подействовать и чтобы не было поглощено слишком много излучения.

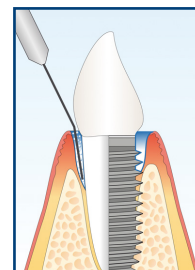


Шаг 5.

Подвергнуть зуб/имплантат воздействию излучения в течение ок. 1 минуты, выполняя круговые движения. Стремиться к контактному экспонированию – по возможности ближе к подкрашенным бактериям = биопленке – в 6 точках по 10 сек.!


Важно: уничтожаются только бактерии, в достаточной степени подвергнутые излучению!


⇒ Обеспечить безупречное состояние оптики и лучше всего ежедневно менять батарейки!

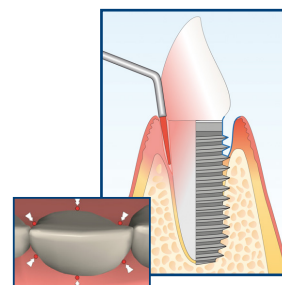

Как часто следует проводить такую терапию?

- При надлежащем применении (вкл. предшествующую очистку зубов, выполненную надлежащим и профессиональным образом) уже после **первого раза** достигается очень хороший результат.
- В случае стойких инфекций, которые трудно поддаются лечению, курс терапии следует повторить примерно **через 1 неделю**, необходимо проверить эффект от **профессиональной очистки зубов** и при необходимости добиться оптимального результата; нужно соблюсти **время воздействия HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю»** в течение **3 минут**.

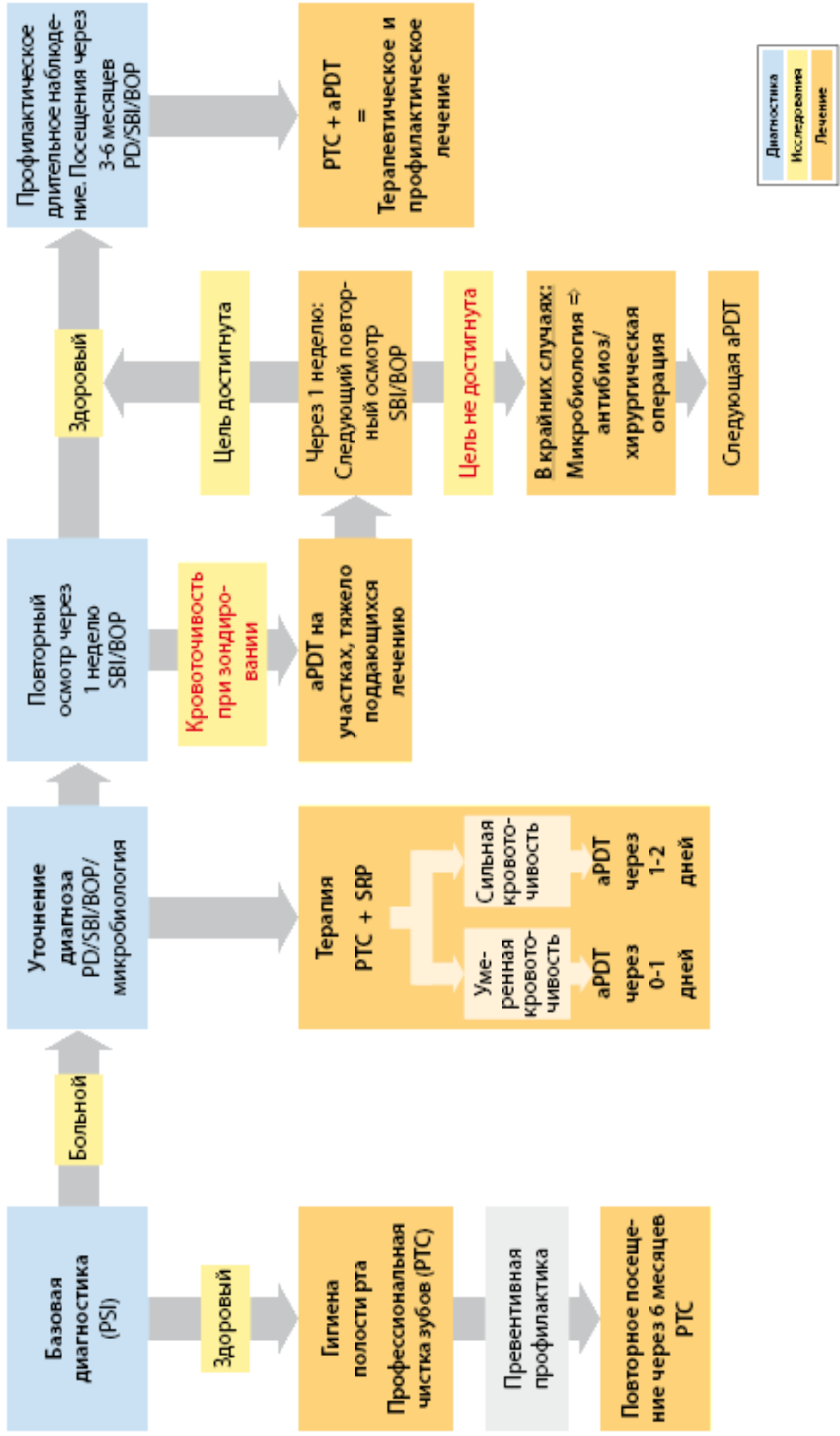

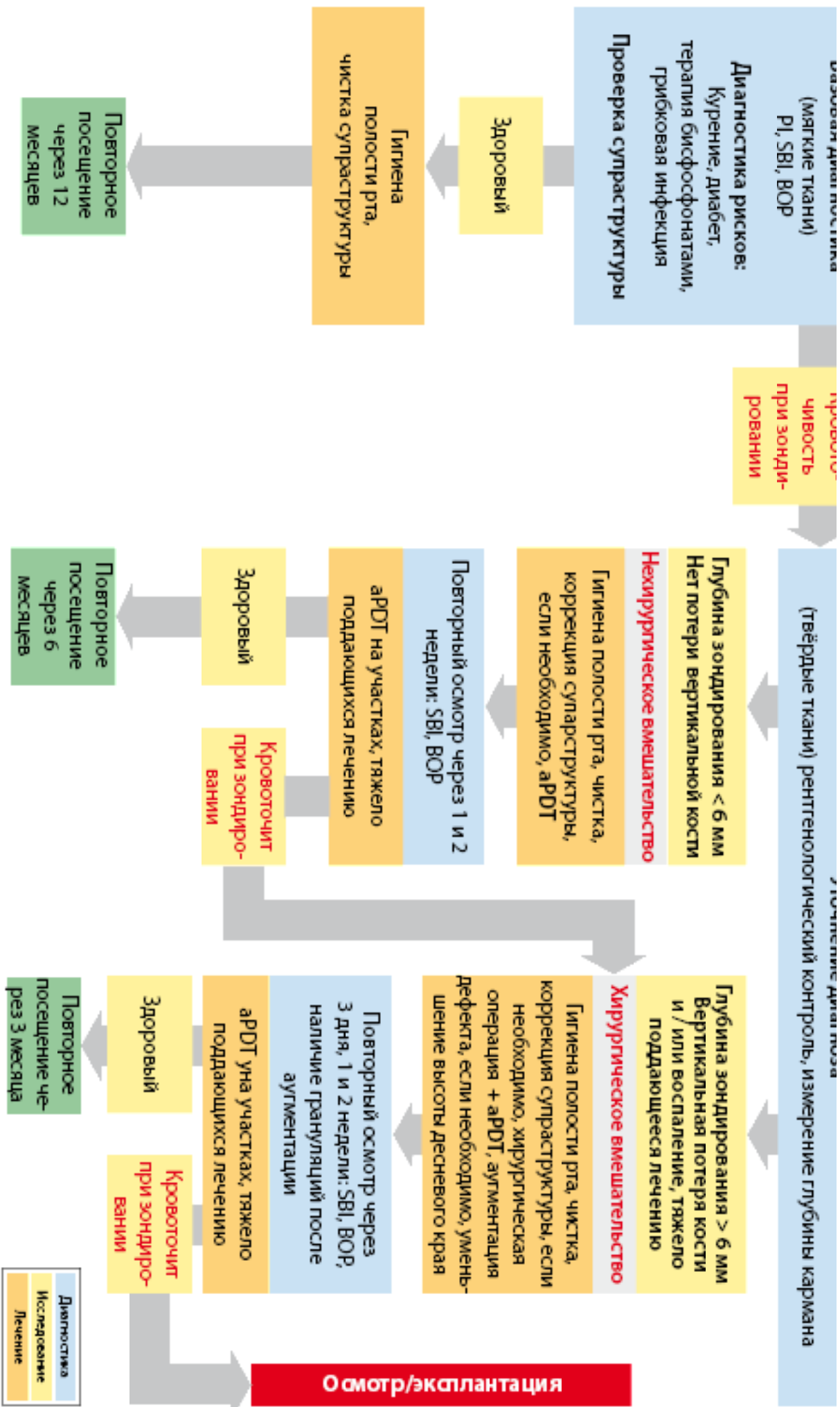


арДТ = Антибактериальная противовоспалительная терапия
SBI = Индекс кровотока индекса десен


BOR = Кровоточивость при зондировании
PI = Индекс прироста тканей



Обращение по поводу лечения в стоматологической клинике Bredent Group или в клинике дистрибуции, которая в Вашем регионе.
Bredent Medical GmbH & Co. KG | Weinberger Str. 2 | 92320 Selb | Germany | T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 | F: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44 | www.bredent-medical.com | info-med@bredent.com

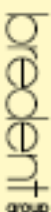

Пародонтит/ периимплантит (хирургическая операция)

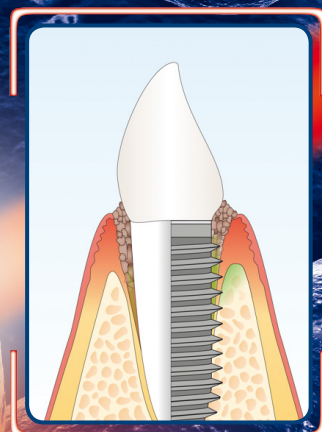

Лечебные материалы

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю»,
0,5 мл



или

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО
Блю», 0,1мл



Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ
Спот Проуб»



Зонд HELBO® 3D Pocket
Probe «ХЕЛЬБО 3-ДЭ
Покет Проуб»



Защитный рукав HELBO®
Cover Sleeve «ХЕЛЬБО
Кавер Слив»



Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»



Шаг 1.

Хирургическое вмешательство: вскрытие, удаление грануляционной ткани и при необходимости омертвевшей кости (при периимплантите).


Важно: должен быть обеспечен доступ к пародонтальному/периимплантитному карману.

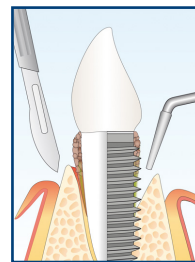

Шаг 2.

Очистка поверхности зуба/имплантата.


Важно: налет и биопленку необходимо удалить наилучшим образом, например, при помощи кюретажной ложки, порошковой струи, предназначенной для поддесневой области, пьезотехнологии.

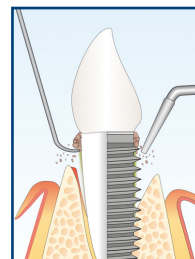

Шаг 3.

Нанесение фотосенсибилизатора HELBO® Blue «ХЕЛБО Блю» на имплантат и мягкую ткань, при необходимости посредством сжатия смоченной марлевой турунды.


Важно: обработать красителем всю область, в т. ч. прилегающую мягкую/твердую ткань.

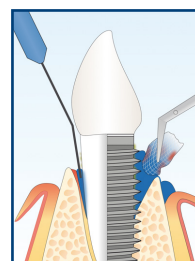

Шаг 4.

Обработка красителем микроорганизмов: длительность воздействия – 3 минуты.


Важно: данная длительность воздействия обеспечивает проникание раствора красителя в биопленку.

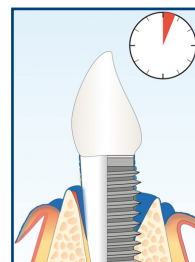

Шаг 5.

Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛБО ТераЛайт»: полоскание (физраствором) в целях уменьшения толщины слоя!


Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения.

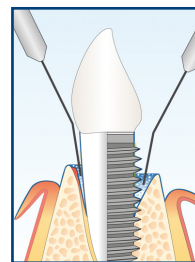

Шаг 6.

Обширное экспонирование при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛБО ТераЛайт» в течение не менее 1 минуты на см² = 30 сек. на точку.


Важно: при наличии глубоких вертикальных дефектов рекомендуется дополнительное применение зонда HELBO® 3D Pocket Probe «ХЕЛБО 3-ДЭ Покет Проуб».

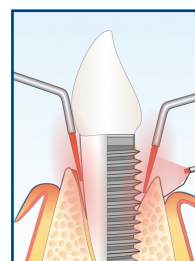


Шаг 7.

При необходимости – наращивание для устранения дефекта, закрытие швом, повторное экспонирование соответствующего участка для достижения фотобиологического эффекта лазера.

Важно: временно находящийся в области проведения операции краситель не имеет негативного влияния.

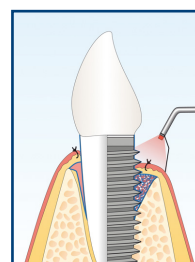

Эндодонтическое лечение (ортоградное)

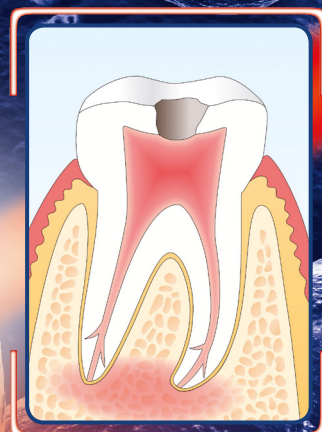

Лечебные материалы

HELBO® Endo Blue
«ХЕЛЬБО Эндю Блю»



Зонд HELBO® 3D Endo Probe
«ХЕЛЬБО 3-ДЭ Эндю Проуб»




HELBO® Endo Seal «ХЕЛЬБО Эндю Сил»



Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»

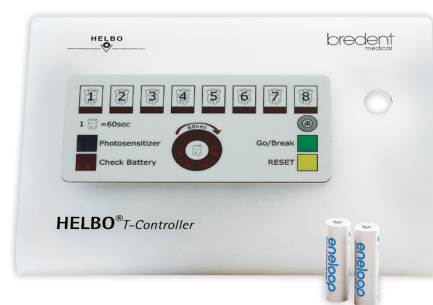

Шаг 1.

Провести традиционную эндодонтическую обработку зуба.


Важно: рекомендуется использование коффердама; обработка на ISO 45 оптимальна (вручную или механизированно), затем прополоскать (H₂O) и просушить бумажными штифтами, после чего последние оставить в каналах.

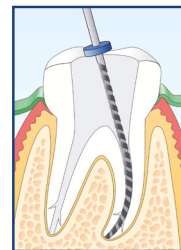

Шаг 2.

В области коронки сплошным слоем нанести материал HELBO® Endo Seal «ХЕЛБ-БО Эндо Сил».


Важно: диффундирующий краситель может привести к продолжительному изменению цвета, поэтому данный участок необходимо непременно предохранять!

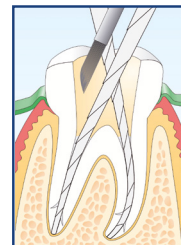

Шаг 3.

Удалить бумажный штифты и нанести HELBO® Endo Blue «ХЕЛББО Эндо Блю» от апикальной области по направлению к корональной.


Важно: обработка ISO 45 оптимальна – при незначительном объеме обработки при помощи HELBO® Endo Blue «ХЕЛББО Эндо Блю» механически переместить к апикальной области (каналорасширитель, спиральный наполнитель Лентуло, гуттаперчевый штифт и т. п.), чтобы краситель попал на все бактерии!

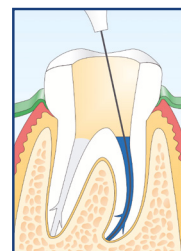

Шаг 4.

Дать HELBO® Endo Blue «ХЕЛББО Эндо Блю» воздействовать не менее 1 минуты.


Важно: уничтожаются только бактерии, подкрашенные синим!
- Диффузия в каналцах обеспечивает глубинное действие!

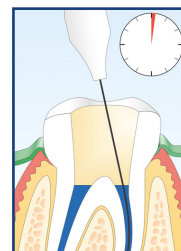

Шаг 5.

Удалить излишки HELBO® Endo Blue «ХЕЛББО Эндо Блю» – лучше всего смыть при помощи H₂O и просушить бумажным штифтом.

Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения; корневые каналы необходимо полностью просушить!

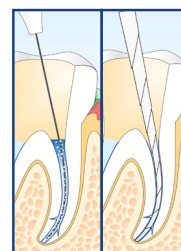


Шаг 6.

Воздействовать излучением на канал в течение 1 минуты: стремиться к контактному экспонированию – по возможности ближе к подкрашенным бактериям, также апикально.

Важно: уничтожаются только бактерии, в достаточной степени подвергнутые излучению!


⇒ Обеспечить безупречное состояние оптики и лучше всего ежедневно менять батарейки!

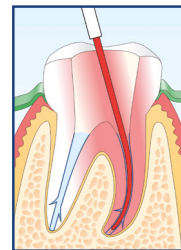


Шаг 7.

Закрыть каналы и механическим путем (финишный бор!) удалить возможные остатки красителя в области коронки.

Важно: благодаря значительному сокращению числа бактерий возможна немедленная окончательная obturation.

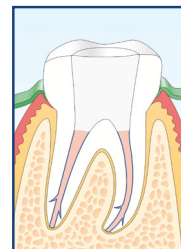

Эндодонтическое лечение (ретроградное)

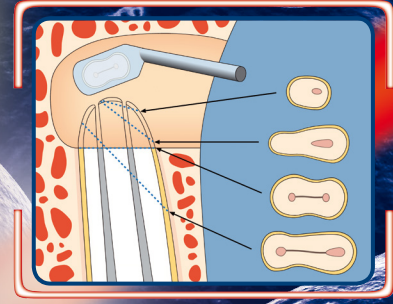

Лечебные материалы

Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»



Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО
Блю», 0,1мл




Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ
Спот Проуб»



Защитный рукав HELBO®
Cover Sleeve «ХЕЛЬБО
Кавер Слив»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»

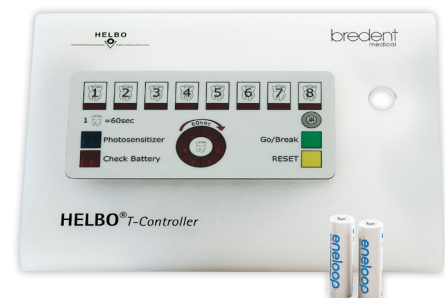

Шаг 1.


Ретроградная обработка после удаления верхушек корней зуба.

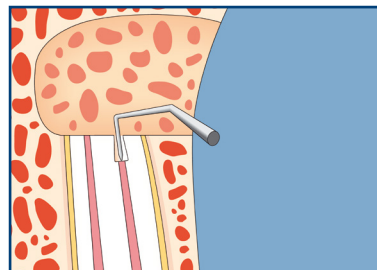

Шаг 2.

Нанесение фотосенсибилизатора HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю».


Важно: обработать красителем всю область, в т. ч. прилегающую мягкую/твердую ткань, инфицированную в результате апикального процесса.

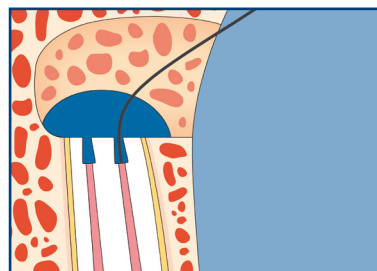

Шаг 3.

Обработка красителем микроорганизмов, целого участка, в т. ч. прилегающей ткани: длительность воздействия – 3 минуты.


Важно: данная длительность воздействия обеспечивает проникание раствора красителя в биопленку.

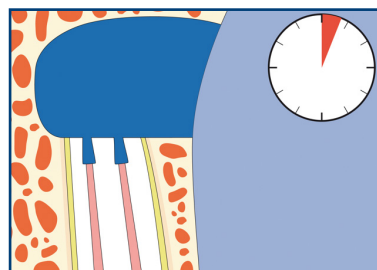

Шаг 4.

Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛЬБО ТераЛайт» прополоскать (физраствором) в целях уменьшения толщины слоя!


Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения.

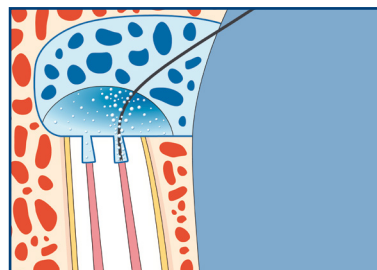

Шаг 5.

Подвергнуть излучению верхушки корней зуба и прилегающую ткань.


Важно: экспонирование при помощи зонда HELBO® 2D Spot Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ Спот Проуб» (обширное экспонирование) ок. 30 сек. на точку.

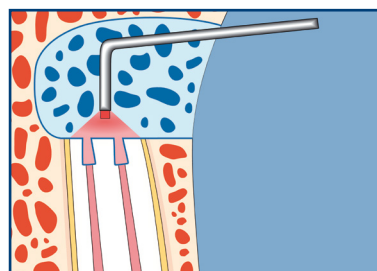


Шаг 6.

Закрывать корневые каналы и раны.

Важно: временно находящийся в области проведения операции краситель не окажет негативного влияния на процесс заживления раны.

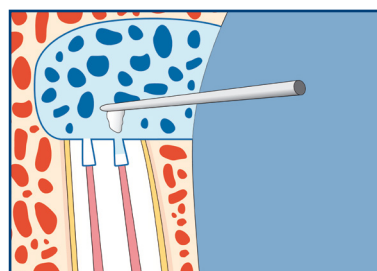

Дезинфекция зубной альвеолы

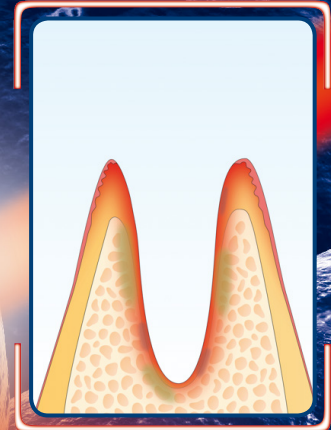

Лечебные материалы

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛБО Блю»,
0,5 мл



или

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛБО
Блю», 0,1мл



Зонд HELBO® 3D Pocket Probe
«ХЕЛБО 3-ДЭ Покет Проуб»




Защитный рукав
HELBO® Cover Sleeve
«ХЕЛБО Кавер Слив»



Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛБО ТераЛайт»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛБО ТЭ-Контроллер»

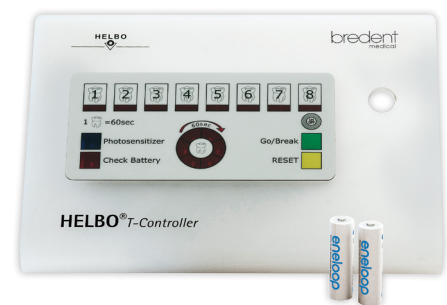

Шаг 1.


По возможности щадящее удаление зуба.

Важно: апикальную и пародонтальную грануляционную ткань необходимо бережно, но полностью выскоблить.

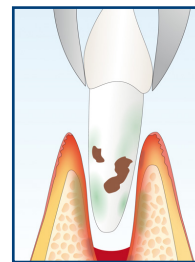**Шаг 2.**


Пропитать марлевую турунду фотосенсибилизатором HELBO® Blue «ХЕЛБЮ Блю» и тампонировать ею альвеолу.

Важно: обработать всю область красителем, при этом марлевая турунда одновременно впитывает кровь.

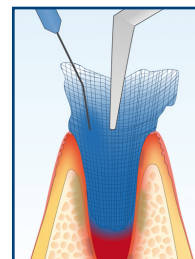**Шаг 3.**


Длительность воздействия материала в альвеоле составляет 3 минуты.

Важно: данная длительность воздействия обеспечивает проникание раствора красителя в биопленку.

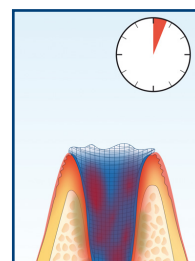**Шаг 4.**


Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛБЮ ТераЛайт» прополоскать (физраствором) в целях уменьшения толщины слоя!

Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения.

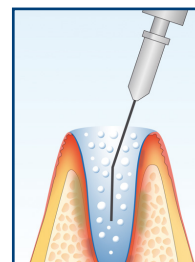**Шаг 5.**


Воздействовать на альвеолу круговыми движениями в течение 1 минуты лазерным излучением, по возможности ближе к стенкам альвеолы, в шести точках по 10 сек.

Важно: при сильном кровотечении из альвеолы удалить кровь при помощи отсоса и время от времени прочищать световод влажным тампоном.

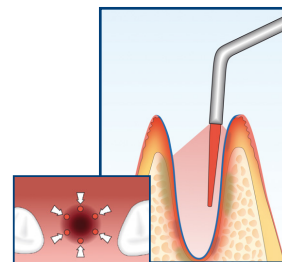**Шаг 6 (вариант 1).**


Немедленная имплантация.

Важно: временно находящийся в области проведения операции краситель не навредит процессу заживления после помещения имплантата/материала, замещающего кость.

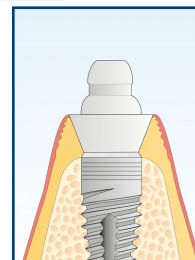
**Шаг 6 (вариант 2).**

Применение материала, замещающего кость в целях сохранения ложа для имплантата, закрытие раны.

Важно: временно находящийся в области проведения операции краситель не навредит процессу заживления после помещения имплантата/материала, замещающего кость.

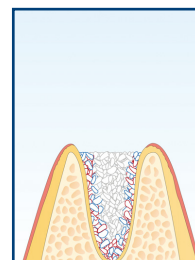

Остеонекроз

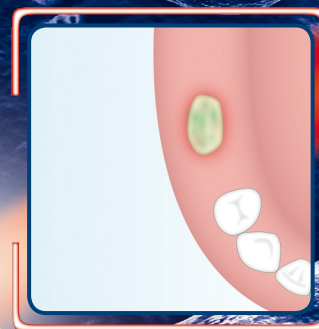

Лечебные материалы

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю»,
0,5 мл



или

Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО
Блю», 0,1мл



Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ
Спот Проуб»



Защитный рукав HELBO®
Cover Sleeve «ХЕЛЬБО
Кавер Слив»



Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»




Шаг 1.

Отделение десны и субпериостальное препарирование. Хирургическое удаление омертвевшей и пораженной кости, сглаживание острых краев кости (моделирующая остеотомия).

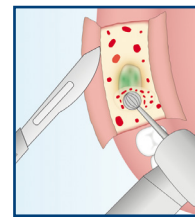**Шаг 2.**


Нанесение фотосенсибилизатора HELBO® Blue «ХЕЛЬБО Блю» на кость и мягкую ткань, при необходимости посредством сжатия смоченной марлевой турунды.

Важно: обработать красителем всю область, в т. ч. прилегающую костную/мягкую ткань (в частности надкостницу).

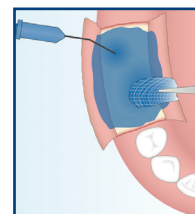**Шаг 3.**


Обработка красителем микроорганизмов: длительность воздействия – 3 минуты.

Важно: данная длительность воздействия обеспечивает подкрашивание раствором красителя оставшихся бактерий.

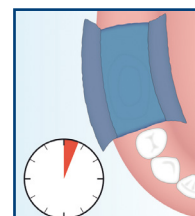**Шаг 4.**


Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛЬБО ТераЛайт» полоскание (стерильная H₂O) в целях поступления достаточного излучения!

Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения. После полоскания обработанная красителем костная и мягкая ткань может быть усеяна бактериями, поэтому ее следует подвергнуть воздействию излучения.

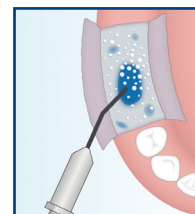**Шаг 5.**


Обширное экспонирование пораженной области.

Важно: экспонирование при помощи зонда HELBO® 2D Spot Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ Спот Проуб» (обширное экспонирование) ок. 30 сек. на точку.

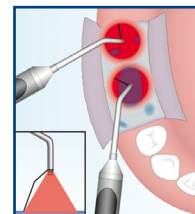**Шаг 6.**

Закрытие раны.

Важно: повторное экспонирование закрытых при операции ран в целях активирования фотобиологического воздействия лазера (способствует заживлению раны и уменьшению боли).

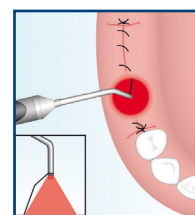

Заболевания кожи/ слизистой оболочки

(напр., высыпания на слизистой оболочке, герпес, кандидоз, расхождение швов)



Лечебные материалы

Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»




Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО
Блю», 0,1мл



Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ Спот
Проуб»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»

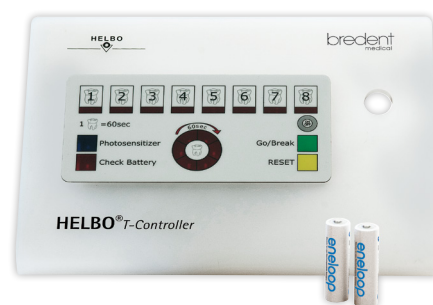

Шаг 1.


Нанесение фотосенсибилизатора HELBO® *Blue* «ХЕЛБО Блю» при помощи канюли или смоченной марлевой турунды, обработка красителем пораженной области.

Важно: перед началом терапии по возможности удалить рыхлый, зернистый налет и биопленку при помощи полоскания (H_2O_2 , NaCl).

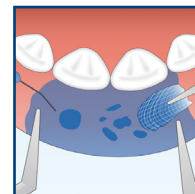**Шаг 2.**


Длительность воздействия фотосенсибилизатора HELBO® *Blue* «ХЕЛБО Блю» – 3 минуты.

Важно: данная длительность воздействия обеспечивает проникание раствора красителя в биопленку.

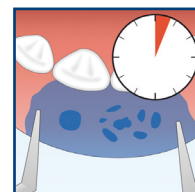**Шаг 3.**


Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® *TheraLite* «ХЕЛБО ТераЛайт» прополоскать (H_2O) в целях уменьшения толщины слоя!

Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения.

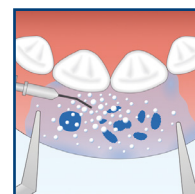**Шаг 4.**


Обширное экспонирование пораженной области.

Важно: Экспонирование при помощи зонда HELBO® *2D Spot Probe* «ХЕЛБО 2-ДЭ Спот Проуб» (обширное экспонирование) ок. 30 сек. на точку воздействия.

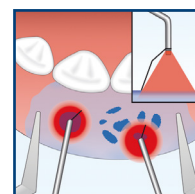
**Шаг 5.**

В случае необходимости повторить курс терапии HELBO® «ХЕЛБО» в зависимости от показаний, степени тяжести заболевания, процесса заживления и возможностей лечения.

Важно: как правило, достаточно макс. 3 курсов, если же это не помогло, следует по возможности продолжить установление причины заболевания.

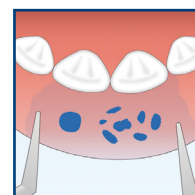

Кариес

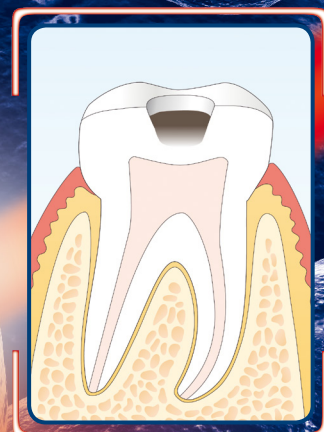

Лечебные материалы

Лазер HELBO® TheraLite
«ХЕЛЬБО ТераЛайт»




Фотосенсибилизатор
HELBO® Blue «ХЕЛЬБО
Блю», 0,1мл



Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ Спот
Проуб»




Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛЬБО ТЭ-Контроллер»

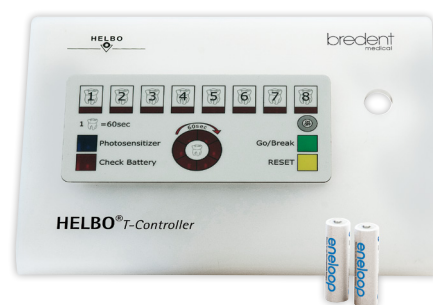


Шаг 1.

Лечение кариеса путем механического воздействия.

Важно: наилучшее удаление пораженной ткани тем не менее с предохранением пульпы.

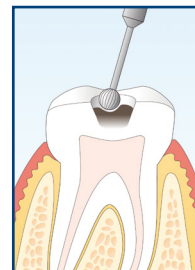
**Шаг 2.**

Нанесение фотосенсибилизатора HELBO® Blue «ХЕЛБОО Блю» в основание полости.

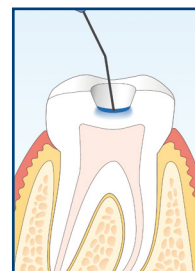


Обработка красителем микроорганизмов: длительность воздействия – 3 минуты.

Важно: данная длительность воздействия обеспечивает проникание раствора красителя в пораженные области.

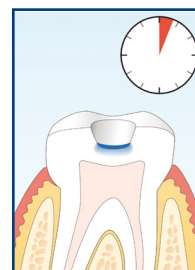
**Шаг 3.**

Перед экспонированием при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛБОО ТераЛайт» – полоскание (H₂O) в целях уменьшения толщины слоя!

Важно: излишний краситель впитывается слишком сильно и препятствует при определенных обстоятельствах надлежащему применению лазерного излучения.

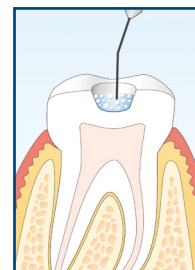
**Шаг 4.**

Обширное экспонирование при помощи лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛБОО ТераЛайт» и зонда HELBO® 2D Spot Probe «ХЕЛБОО 2-ДЭ Спот Проб» (обширное экспонирование) ок. 30 сек. на точку.

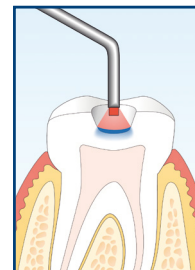**Шаг 5.**


По необходимости удаление частиц красителя с боковой стенки полости. Закрытие полости.

Важно: временно находящиеся в основании полости остатки красителя не представляют угрозы для результатов лечения.

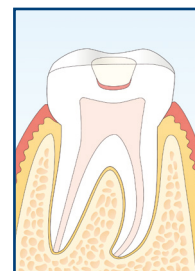

Фотобиологический эффект лазера

(способствует заживлению ран, уменьшает боль, оказывает противовоспалительное действие)

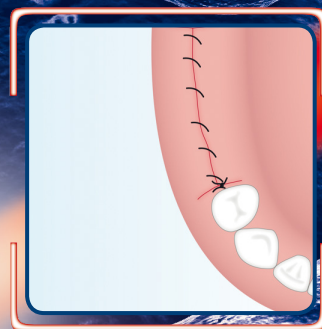


Лечебные материалы

Зонд HELBO® 2D Spot
Probe «ХЕЛБО 2-ДЭ Спот
Проб»



Прибор HELBO® T-Controller
«ХЕЛБО ТЭ-Контроллер»

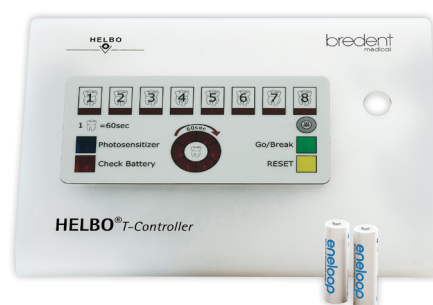

Лазер HELBO® TheraLite «ХЕЛБО ТераЛайт»




Цель:

Стимуляция эндогенных восстановительных процессов (синтез АТФ, митохондриальная активность) для лучшего заживления ран, уменьшения боли и подавления воспалительного процесса благодаря применению низкоэнергетического лазерного излучения. Применение лишь лазерного излучения (без раствора красителя) имеет смысл во всех ситуациях, не связанных с инфекцией, например, в области челюстной ортопедии (фиксация ортодонтических колец) и при операционных ранах после хирургического вмешательства.


Процедура:

Обширное экспонирование пораженной области.

Важно: экспонирование при помощи зонда HELBO® 2D Spot Probe «ХЕЛЬБО 2-ДЭ Спот Пробу» (обширное экспонирование) ок. 30 сек. на точку.

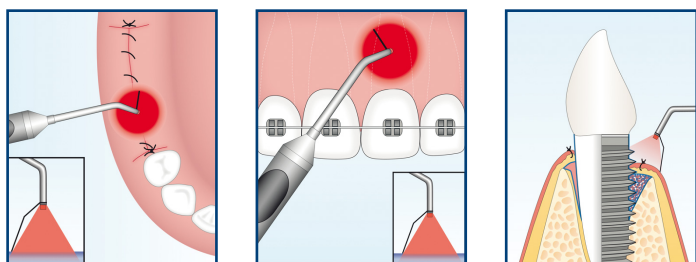

При использовании антимикробной фотодинамической терапии (раствор красителя и лазерный луч) для лечения инфекций фотобиологическое действие представляет собой положительный побочный эффект.

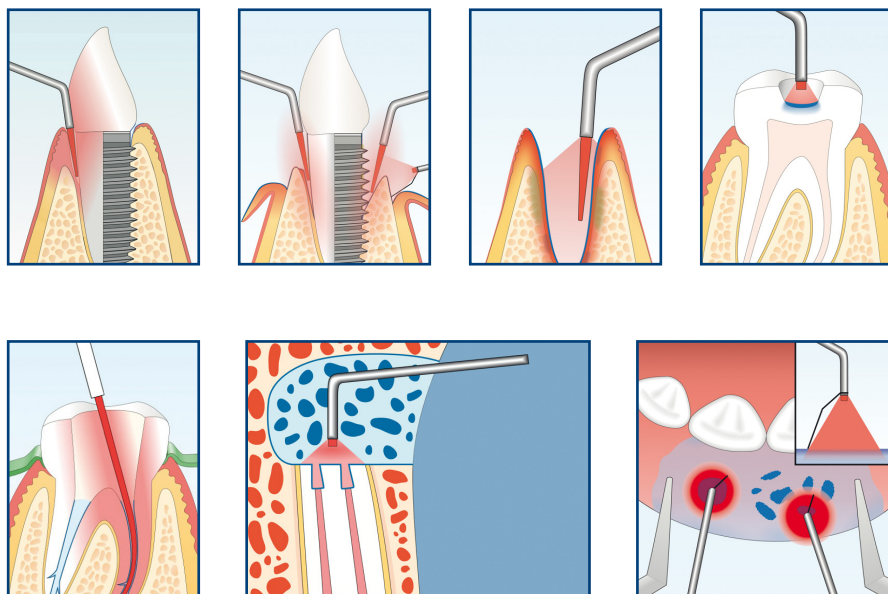
**Указание:**

Повторять процедуру с применением лазера HELBO® TheraLite «ХЕЛЬБО ТераЛайт» для достижения фотобиологического эффекта по мере необходимости в зависимости от показаний, степени тяжести заболевания, процесса заживления и возможностей лечения.


Руководство по применению HELBO® «ХЕЛЬБО»




Дополнительная литература

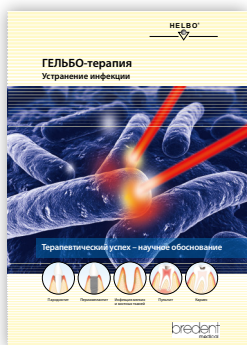

REF 000 429 RU

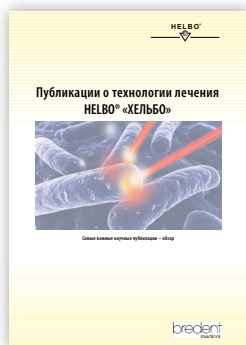

REF 000 461 RU

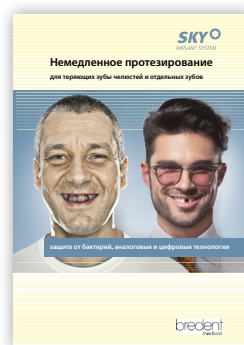

REF 000 200 RU

bredent
medical

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent medical GmbH & Co. KG |
Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43
Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent-medical.com
@: info-medical@bredent.com

ПРЕМ'ЕР ДЕНТАЛ
СТОМАТОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ,
ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Представитель в Украине - компания "Премьер-Дентал"
ул. Варшавская, 69 "Б", Львов, 79020
+38 032 259 04 40
+38 097 445 66 73
0 800 501 242
www.premier-dental.com.ua

