







Час обробки матеріалів для CEREC SpeedFire CEREC SW ≥ 5.2 (XB.)

April 2023

Виробник	Назва матеріалу	Сушка*	Сушка* Multi	Синтеризація однієї коронки (сухої)*	Синтеризація декількох коронок (сухої)*	Синтеризація однієї коронки (мокрої)*	Синтеризація декількох коронок (мокрих)*	Синтеризація містка (сухого)*	Синтеризація містка (мокрого)*	Кристалізація/Глазування/Кристал./Глазування Multi	Глазування/Глазування Multi	
	inCoris ZI meso	12	-	35.5	-	47.5	-	-	-	-	-	
	inCoris TZI	12	12	18.5	31.75	30	48.5	32	48.5	-	9	
	inCoris TZI C	12	12	13.5-17	24.75	25.5-29	41.5	25	41.5	-	9	
	CEREC MTL Zirconia	12	12	18.75-25.5	18.75-25.5	30.75-41.5	30.75-41.5	18.75-25.5	30.75-41.5	-	9	
	CEREC Zirconia+	12	12	14.75-31.25	31.25	26.75-47.25	47.25	14.75-31.25	26.75-47.25	-	7.5-9.5	
	CEREC Zirconia	12	12	13.5-17	24.75	25.5-29	41.5	25	41.5	-	9	
	CEREC Zirconia Meso	12	-	25	-	41.5	-	-	-	-	9	
	CEREC Blocs C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
	CEREC Blocs C PC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5
	CEREC Blocs C In	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5
	Celtra Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.75
	CEREC Tessera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5-10.5
	CEREC Tessera Abutment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5-10.5
	KATANA Zirconia STML	12	12	18.5-31	18.5-31	31.5-43	31.5-42.5	43	43	-	8.5	
	KATANA Zirconia ONE	12	12	18.5-31	18.5-31	31.5-43	31.5-42.5	43	43	-	8.5	
	VITA Mark II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	
	VITA SUPRINITY	-	-	-	-	-	-	-	-	34	12.5	
	VITA RealLife	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	
	VITA TriLuxe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	
	VITA TriLuxe forte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	
	VITA YZ HT	12	12	14.25-17.25	24.75	26.25-29	41.5	24.75	41.5	-	9	
	Chairside Zirconia	12	12	19.5-22.5	24.5	33.5	35.5	24.5	35.5	-	9	
	IPS e.max CAD LT, MT, HT	-	-	-	-	-	-	-	-	17-39	20-34.5	
	IPS e.max CAD MO, Impulse	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5-42	20-34.5	
	IPS e.max CAD Abutment LT	-	-	-	-	-	-	-	-	24-39	20-34.5	
	IPS e.max CAD Abutment MO	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5-42.5	20-34.5	
	IPS e.max ZirCAD LT	10.75-15	15	18.75-28.5	28.5	29.5-43.75	43.75	28.5	43.75	-	16.75	
	IPS e.max ZirCAD MT	10.75-15	15	49-98.25	49	59.75-113.5	64.25	141.5	156.75	-	16.75	
	Initial LiSi Block	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	

* Час спікання/глазування та кристалізації залежить від товщини та кольору реставрації