

Enhance®

Система для фінішної обробки

Фінішна обробка

та полірування за один крок

Завдяки системі фінішної обробки Enhance® ви зможете видаляти надлишки реставраційного матеріалу, проводити контурування та фінірування просто змінюючи силу тиску. Натисніть сильніше для видалення надлишків матеріалу. Відпустіть тиск для проведення фінішної обробки. З системою Enhance® ви всього за один крок отримаєте гладку контуровану поверхню, що природно виглядає. І все це тільки завдяки різній силі натискання.



Простіше. Швидше. Вражаючі результати

Простота використання є одним з найважливіших факторів при виборі системи фінішної обробки для більш ніж 70% стоматологів. Тому ми розробили систему Enhance®.

Фінішна обробка всього за один крок? Немає нічого простіше!

Натисніть сильніше для видалення надлишків реставраційного матеріалу і контурування. Зменшіть тиск та отримайте природно гладку поверхню. Тепер немає потреби міняти інструменти, ви можете зосередитися на лікуванні, швидше досягаючи відмінних результатів.



Видалення надлишків реставраційного матеріалу та контурування




Фінірування



Реставрація порожнини II класу з використанням ceram.x® SphereTEC™ one і фінірування за допомогою Enhance®

Максимум блиску

Після фінішної обробки надайте реставрації дзеркального блиску, використовуючи систему діамантових полірів Enhance® PoGo®

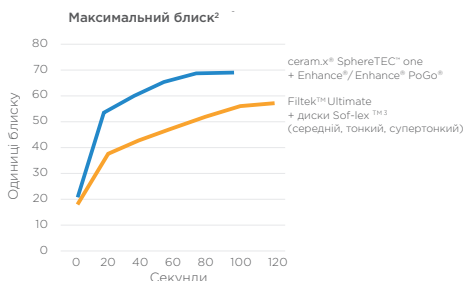

Інформація для замовлення

Набори Enhance® Refill

30 дисків 624045X
30 чашок 624055X
30 конусів 624065X

Набір Enhance® System Kit 624075

20 дисків, 10 конусів, 10 чашок Enhance® для фінішної обробки, 1 полірувальна паста Prisma® Gloss™ (стандартна), 1 полірувальна паста Prisma® Gloss™ extra fine (з наддрібним розміром частинок).



Рекомендації з використання Enhance і Enhance PoGo:

- без води
- 10000 - 15000 об./хв.
- без надмірного тиску на інструмент
- не можна використовувати з турбінними наконечниками (> 20000 об./хв.)

Представництво
«ДЕНТСПЛАЙ ЛІМІТЕД» в Україні
03038, Україна, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 2
тел.: +38 (044) 594 56 04

www.dentsplysirona.com

1. Exevia: Dental Shuttle 04, 2016, Німеччина.
2. da Costa J, Ferracane JL,
ONSU (Operon Хелт & Саенс Юніверсіті, США)
3. Зареєстровані торгові марки,
що не належать Dentsply Sirona,
K79200250-02