

## **Відновлення акумулятора**

Функція відновлення акумулятора використовується для виправлення втрати ємності (при неправильному використанні)

1. Під'єднайте блок живлення
2. Натисніть та утримуйте кнопку живлення більше 2-х секунд, при одночасному натисканні кнопки РЕВЕРС
3. Після звукового сигналу почнеться режим відновлення, в цей час ІНДИКАТОР ЗАРЯДКИ буде повільно блимати
4. Процес заряджання і розряджання буде тривати одночасно
5. Тривалість процесу близько 10 год.
6. Для завершення процесу натисніть та утримуйте кнопку живлення більше 2-х секунд.

Ця функція є ефективним методом для вирішення проблеми «ефекту пам'яті», однак в зв'язку з характеристиками акумулятора, дана проблема може бути не вирішена за один раз. У такому випадку рекомендуємо повторити процес кілька разів.

Вся інформація вказана в інструкції до приладу\*