

SYSTEM

zetaplus



A MATTER OF TRUST

Clinical

C-Silicone Impression Material

Zhermack®

CLINICAL



zetaplus system

Решение для любых клинических случаев.


ZHERMACK подтверждает успех **ZETAPLUS SYSTEM**.

Система **ZETAPLUS SYSTEM** ценится во всем мире уже в течение 25 лет и со временем подтвердила свои высокие эксплуатационные клинические качества и надежность, необходимые для достижения наилучших результатов в области зубопротезирования.



SYSTEM

zetaplus

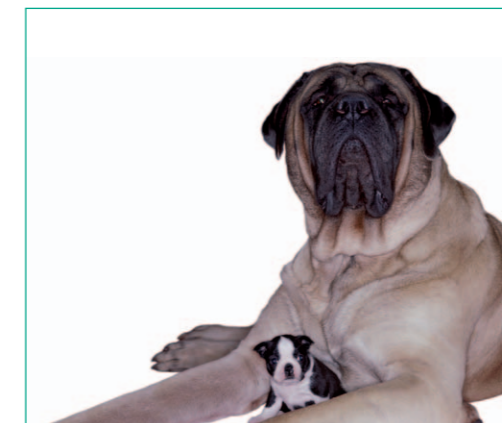

СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБКИ

› Четкий цветовой контраст для снижения вероятности ошибки, что позволяет экономить время и материал.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ РЕАКЦИЯ

- › Идеальное соотношение между временем обработки и временем схватывания (эффект **snap-set**).
- › Оптимальная дозировка катализатора увеличивает эффективное время обработки и уменьшает усадку.

ЭФФЕКТ "FLOW CONDITIONING"

› Улучшенная **текучесть и повышенная стабильность размеров** как результат использования высокоактивных сферических наполнителей SAS (Синтетические Аморфные Силиконы).

zetaplus system

Эффект "Flow conditioning" для получения высокоточных оттисков.



ZETAPLUS с ORANWASH L и THIXOFLEX M

ZETAPLUS, начальная текучесть, конечная твердость.

Эффект "flow conditioning" придает материалу **текучесть** и **снижает давление** на слизистую оболочку. Благодаря его конечной твердости **ZETAPLUS** рекомендуется использовать как **базовый** материал в технике двойного оттиска.

ORANWASH L, гидрофильный и текучий

Этот легкий по консистенции, гидрофильный силикон с высокой текучестью, подходит для техники двойного оттиска.

THIXOFLEX M, тиксотропный, текучий и гидрофильный

Этот **легкий по консистенции, тиксотропный силикон высокой текучести** обеспечивает **высокую точность воспроизведения деталей** во влажной окружающей среде, благодаря своей **высокой гидрофильности**. **Рекомендуется для техники двойного смешивания («сэндвич»)**.



Текучесть благодаря эффекту "flow conditioning"



Текучесть в десневой борозде

ZETAPLUS SOFT с ORANWASH VL

ZETAPLUS SOFT, текучий и эластичный


Этот **текучий и эластичный базовый силикон** подходит для любой клинической ситуации и особо рекомендуется для использования в **технике двойного смешивания**.



Оптимальная твердость

ORANWASH VL, гидрофильный и с высокой текучестью

Этот **сверхлегкий по консистенции, гидрофильный силикон высокой текучести** подходит для любой техники снятия оттиска.

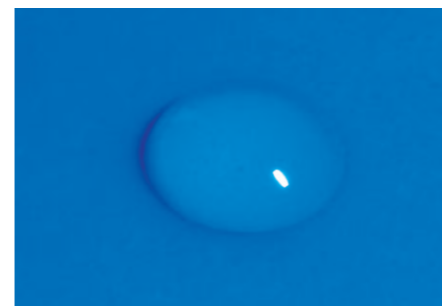

Гидрофильность после 1 минуты




Текучесть при обработке

indurent gel u zetaplus system

Идеальный цветовой контраст.

Катализатор **INDURENT GEL** гарантирует равномерное смешивание как с использованием базового материала, так и с корректирующими материалами **ZETAPLUS SYSTEM**.

Идеальное соотношение между временем обработки и временем

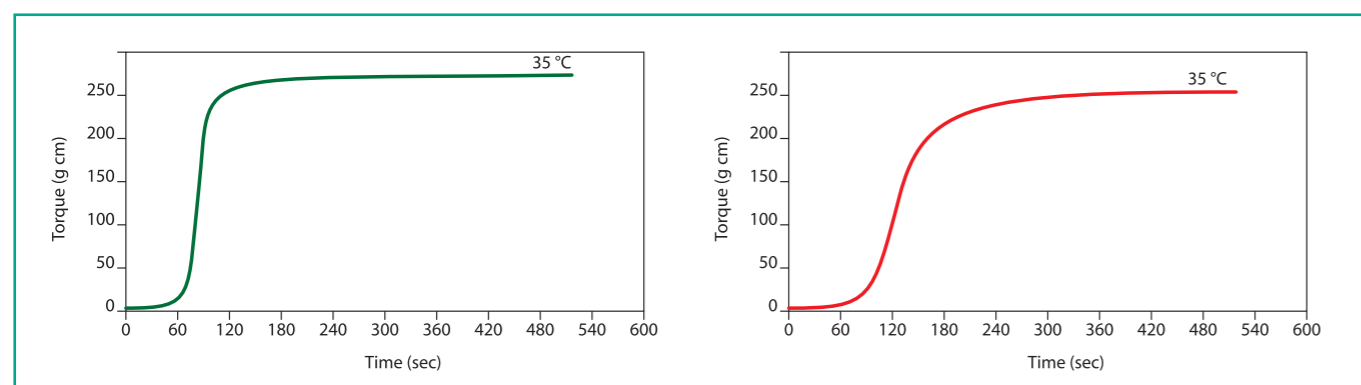

Эффект SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft)

Эффект SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ZETAPLUS	ZETAPLUS SOFT	ORANWASH VL	ORANWASH L	THIXOFLEX M
Время смешивания	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.
Суммарно время обработки	1 min. 15 sec.	1 min. 15 sec.	1 min. 30 sec.	1 min. 30 sec.	2 min.
Пробы в ротовой полости	3 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Время схватывания	4 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.	5 min.	5 min.	5 min. 30 sec.
Деформация при сжатии (мин./макс.)	2% - 5%	2% - 5%	2% - 8%	2% - 8%	2% - 8%
Упруго восстановили	> 98%	> 98%	> 99%	> 99%	> 99%
Стабильность размеров	< -0,2%	< -0,2%	< -0,7%	< -0,7%	< -0,7%

Эксплуатационные качества ZETAPLUS SYSTEM



zetaplus system
Надёжность в любой ситуации.

SYSTEM**zetaplus****Виды упаковки**

C100600 ZETAPLUS	1 банка 900 мл/1.53 кг + мерная ложка
C100312 ZETAPLUS	1 банка 1800 мл/3 кг + мерная ложка
C100468 ZETAPLUS	1 банка 10 кг + мерная ложка
C100469 ZETAPLUS	1 банка 25 кг
C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L	1 банка Zetaplus, 900 ml/1.53 kg + мерная ложка + 1 тубик Oranwash L, 140 ml + 1 тубик Indurent gel, 60 ml + mixing pad
C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L	1 банка Zetaplus, 200 ml + мерная ложка + 1 тубик Oranwash L, 40 ml + 1 тубик Indurent gel, 60 ml + mixing pad
C100610 ZETAPLUS SOFT	1 банка 900 мл/1.53 кг + мерная ложка
C100612 ZETAPLUS SOFT	1 банка 1800 мл/3 кг + мерная ложка
C100613 ZETAPLUS SOFT	1 банка 10 кг + мерная ложка
C100614 ZETAPLUS SOFT	1 банка 25 кг
C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL	1 банка Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 kg + мерная ложка + 1 тубик Oranwash VL, 140 ml + 1 тубик Indurent gel, 60 ml + mixing pad
C100710 ZETAPLUS SOFT TRIAL KIT VL	1 банка Zetaplus Soft, 200 ml + мерная ложка + 1 тубик Oranwash VL, 40 ml + 1 тубик Indurent gel, 60 ml + mixing pad
C100650 ORANWASH VL	1 тубик, 140 ml
C100660 ORANWASH L	1 тубик, 140 ml
C100670 THIXOFLEX M	1 тубик, 140 ml

Катализаторы

C100700 INDURENT GEL	Гель - 1 тубик 60мл
C100390 INDURENT LIQUID	Жидкость - 1 флакон 30 мл

Оборудование

C303230 ALGHAMIX II	Автоматический смеситель для силиконов и альгинатов (230 V)*
C303215 ALGHAMIX II	Автоматический смеситель для силиконов и альгинатов (115 V) *

Принадлежности

C207200	шпатель для силиконов из нержавеющей стали, ламинированный, стерилизуемый. упаковка содержит 1 шпатель
D510010	Putty Cut
C303020	Диск для силиконов с 3 блоками смешивания для Alghamix II
C303030	Блок смешивания для Alghamix II 20 листов

*Диск для замешивания силиконов доступен отдельно

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. +0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION